

Orbisana Nackenstrecker mit Wärmefunktion

Art.-Nr. 147422281

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



1. Produktidentifikation

- Nackenstrecker mit Wärmefunktion
- Ergonomisches Design zur Linderung von Schmerzen
- Kombiniert mit der Wärmefunktion, fördert es die Durchblutung und eine Entspannung des Nackenbereichs

Technische Daten

- Betriebsspannung: 5 V DC, 1 A (über USB-Ladekabel)
- Heizfunktion: 40 °C

2. Inbetriebnahme / Aufbau

Um die Wärmefunktion nutzen zu können, schließen Sie das USB-Kabel an eine Powerbank, einen Computer oder einen USB-Netzadapter (5V DC, 1A) ordnungsgemäß an. Linderung von Nackenschmerzen in nur 10 Minuten.

3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Nackenstrecker ist ausschließlich für den Anwendung im Privatgebrauch bestimmt und nicht für eine gewerbliche Nutzung geeignet.
- Der Nackenstrecker eignet sich nicht für therapeutische bzw. medizinische Zwecke.
- Der Nackenstrecker darf nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben verwendet werden.
- Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.
- Der Hersteller oder Inverkehrbringer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.

4. Sicherheitshinweise

Warnung:

- Verwenden Sie den Nackenstrecker nicht bei Verletzungen im Halswirbel, Brustbereich und Schulterbereich
- Konsultieren Sie Ihren Arzt vor der Anwendung des Nackenstreckers sollten Sie chronische Beschwerden haben
- Der Nackenstrecker ist nicht für Schwangere und Kinder geeignet
- Der Nackenstrecker ist nicht für Personen mit körperlichen Einschränkungen geeignet
- Beenden Sie die Anwendung sofort bei auftretenden Schmerzen oder Unwohlsein
- Verwenden Sie den Nackenstrecker nicht im Schlaf
- Verwenden Sie den Nackenstrecker nicht als Kissen
- Verwenden Sie den Nackenstrecker max. 30 Minuten lang
- Beenden Sie die Anwendung bei Hautreizungen
- Achten Sie bei der Anwendung des Nackenstreckers darauf, dass dieser stabil steht und das Sie auf einer ebenen Fläche liegen
- Schließen Sie das Nackenstrecker nicht kurz und nehmen keine Reparaturen vor
- Durchstossen Sie den Nackenstrecker nicht mit spitzen Gegenständen
- Betreiben Sie den Nackenstrecker nur mit Netzteilen die der Betriebsspannung entsprechen

Vorsicht:

- Überprüfen Sie den Nackenstrecker vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen
- Verwenden sie das Gerät nicht in Feuchträumen
- Trennen Sie den Nackenstrecker sofort von der Stromversorgung sollte dieser zu heiß werden

Hinweis:

Trennen Sie den Nackenstrecker von der Stromversorgung, wenn Sie diesen nicht mehr verwenden

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Gerät darf nur mit der vorgesehenen Kleinspannung SELV betrieben werden.
- Bewahren Sie diese Anleitung für den künftigen Gebrauch sicher auf.



Lesen Sie sämtliche Anweisungen, bevor Sie den Nackenstrecker benutzen.



Keine Stifte oder Nadeln einstecken.



Nicht für sehr kleine Kinder (0-3 Jahre) geeignet.



Nicht bleichen.



Nicht chemisch reinigen.



Nicht waschbar.

- Wenn Sie das Gerät aufbewahren, lassen Sie es vor dem Zusammenlegen abkühlen.
- Knittern oder falten Sie den Nackenstrecker nicht, indem Sie Gegenstände darauflegen.
- Von Wasser fernhalten. Nicht benutzen, wenn das Produkt feucht ist.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen.
- Benutzen Sie den Nackenstrecker nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gegenstände in den Nackenstrecker hineinstecken.
- Kinder, die jünger als drei Jahre sind, dürfen diesen Nackenstrecker nicht benutzen, da sie unfähig sind, auf eine Überhitzung zu reagieren.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch an den Lieferanten zurückgeben.
- Nicht für den medizinischen Gebrauch im Krankenhaus bestimmt.
- Nicht geeignet für hitzeunempfindliche Personen und andere sehr empfindliche Personen.
- Unsachgemäßer Umgang mit dem Nackenstrecker kann zu Beschädigungen der Heizdecke führen.
- Schalten Sie den Nackenstrecker nicht ein, wenn er gefaltet oder geknittert ist.

5. Lieferumfang

1x Nackenstrecker
1x USB-Kabel

6. Reinigung und Pflege

- Ziehen Sie das USB-Kabel aus dem Nackenstrecker und warten Sie, bis das Produkt vollständig abgekühlt ist, bevor Sie sie reinigen.
- **Warnung:** Waschen Sie das Produkt nicht unter fließendem Wasser, tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie die Außenfläche mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel oder scharfe Reiniger.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig abgekühlt ist, bevor Sie sie lagern.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 0821/90 069 959 **E-Mail:** info@weltbild.de
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

Schweiz **Telefon:** 0848/810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0:08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

Österreich **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)