

# Hörhilfe

Art.-Nr. 141 864 707

## BEDIENUNGSANLEITUNG


*Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.*



## Verwendungszweck

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Hörhilfe entschieden haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, andere gut zu verstehen, kann eine Hörhilfe Ihnen dabei helfen, Ihre Hörleistung zu steigern.

## Bedienelemente

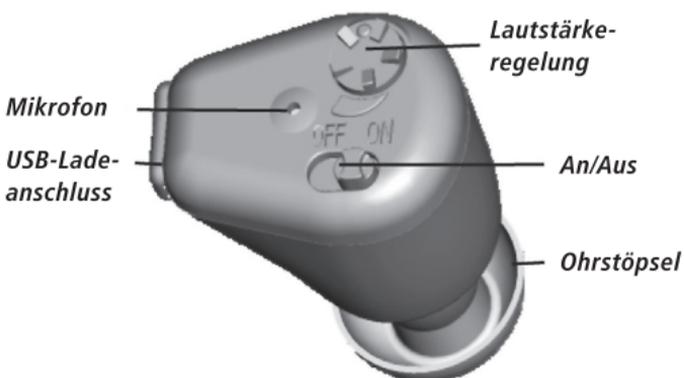

## Lieferumfang


Ladekabel, Ersatzteile, Aufbewahrungsbox

## Bedienung


1. Stecken Sie den Ohrstöpsel in die Hörhilfe (Abb. 1).
2. Schalten Sie die Hörhilfe ein (Abb. 2).
3. Setzen Sie die Hörhilfe mit dem Ohrstöpsel fest in Ihr Ohr und bewegen Sie das Gerät leicht nach oben und unten, um sicherzustellen, dass es richtig sitzt (Abb. 3).
4. Wenn Sie ein Pfeifen hören, überprüfen Sie bitte, ob der Ohrstöpsel fest sitzt oder ob Sie einen Ohrstöpsel anderer Größe verwenden sollten.



*Abb. 1*

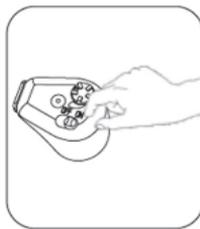

*Abb. 2*

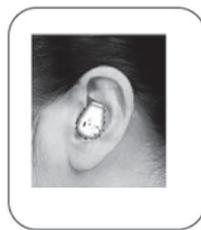

*Abb. 3*

## Pflege und Wartung

- Bitte schalten Sie die Hörhilfe aus, wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen.
- Zum Reinigen wischen Sie das Gehäuse der Hörhilfe mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
- Vergewissern Sie sich, dass die Ohrstöpsel frei von Ablagerungen und Schmutz sind.



*Abb. 4*



*Abb. 5*

## Akku laden

1. Schalten Sie die Hörhilfe aus, bevor Sie den Akku laden.
2. Öffnen Sie die USB-Kappe der Hörhilfe und schließen Sie das USB-Ladegerät an (Abb. 4).
3. Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose, um das Hörgerät aufzuladen (Abbildung 5). Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot. Sobald der Akku vollständig aufgeladen wurde, leuchtet die Anzeige grün.
4. Bei Erstinbetriebnahme sollte der Akku der Hörhilfe 8 Stunden lang aufgeladen werden. Danach genügen nur noch etwa 2 - 3 Stunden zum Aufladen.
5. Die Hörhilfe hat einen eingebauten Ni-MH-Akku mit 1,2 V / 40 mAh. Nach vollständiger Aufladung kann das Gerät etwa 30 Stunden ununterbrochen getragen werden.

6. Bitte laden Sie die Hörhilfe ausschließlich mit dem mitgelieferten Ladegerät (1,5 V / 8 mA). Die vorgeschriebene Spannung beträgt 100-240 V ~. Die Verwendung mit einer nicht angegebenen Leistung oder Spannung kann einen Brand, Stromschlag oder den Ausfall des Hörgeräts verursachen.

**HINWEIS:** Der Akku dieser Hörhilfe darf zum Laden NICHT an einem Computer angeschlossen werden. Laden Sie das Hörgerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Ladegerät und benutzen Sie KEINE anderen Ladegeräte.


## Wichtige Sicherheitshinweise

- Bitte benutzen Sie die Hörhilfe nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke. Dies kann zu Gehörschäden führen.
- Bitte warten Sie das Produkt regelmäßig, um zu vermeiden, dass der Ohrstöpsel und die Mikrofonöffnung durch Fremdkörper blockiert werden.
- Bitte benutzen Sie die Hörhilfe nicht beim Duschen oder Schwimmen, bei Regen oder in feuchter Umgebung. Setzen Sie das Gerät nicht der Sonne aus und kommen Sie nicht in die Nähe eines Ofens oder anderer Hitzequellen.
- Bitte schützen Sie die Hörhilfe sorgfältig und lassen Sie das Gerät nicht auf den Boden fallen.

- Nehmen Sie die Hörhilfe nicht auseinander und verändern Sie das Gerät nicht.
- Diese wiederaufladbare Hörhilfe ist NICHT für den Gebrauch von Kindern geeignet. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn Sie eine Reizung verspüren.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Hörhilfe nicht von anderen Personen benutzt wird, da dies Hörschädigungen der anderen Person oder Schäden am Gerät verursachen kann.
- Schalten Sie die Hörhilfe bei Nichtgebrauch aus, damit der Akku länger hält.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen oder den Akku auszutauschen. Dadurch endet der Gewährleistungsanspruch.

## Fehlersuche

- a) Warum funktioniert die Hörhilfe nicht
- Die Hörhilfe ist ausgeschaltet, schalten Sie bitte das Gerät ein.
  - Der Akku der Hörhilfe ist leer, bitte laden Sie den Akku vollständig auf.
- b) Der Klang ist undeutlich
- Die Lautstärke ist zu niedrig, bitte erhöhen Sie die Lautstärke.
  - Die Akkuladung ist schwach, bitte laden Sie den Akku der Hörhilfe vollständig auf.

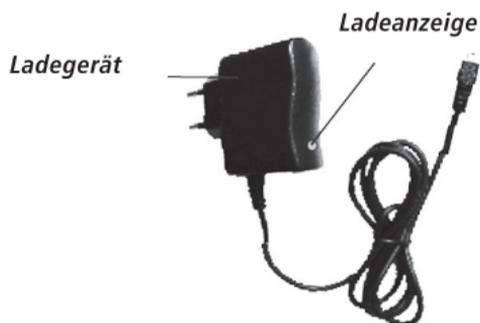

## Technische Daten

- Maximale Tonleistung: 125 dB  $\pm$  4 dB
- Schallverstärkung:  $\geq$  38 dB
- Gesamte harmonische Wellenverzerrung:  $\leq$  10 %
- Frequenzbereich: 450 Hz ~ 3.500 Hz
- Eingangsruschen:  $\leq$  30 dB
- Spannung: 1,2 V DC
- Stromstärke:  $\leq$  2 mA

## Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



## Weltbild KUNDENSERVICE:

Bei Fragen zu dem Artikel wenden Sie sich bitte an:  
**Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg**

**DEUTSCHLAND** **Telefon:** 0821/90069959  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)  
**E-Mail:** info@weltbild.de

**SCHWEIZ** **Telefon:** 0848 810 810  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr,  
Fr. 0,08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)  
**E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch

**ÖSTERREICH** **Telefon:** 0662/939 0 939  
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)  
**E-Mail:** kundenservice@weltbild.at